

## Especificaciones del producto

SKU:  
TM977-T

Descripción:  
Cama reclinable eléctrica

Dimensiones del producto:  
221.4 x 93.9 cm

Peso de Producto  
80.7 kg

Peso Soportado  
204 kg (con accesorios y colchón incluidos)

Altura con ruedas  
38.1 cm (mín) | 57.1 cm (máx)

Compatible con barandal TM912



## Características

- Ajustes eléctricos de alta precisión en la parte superior e inferior.
- Construcción sólida de acero reforzado con acabado hipoalergénico resistente hasta 204 kg.
- Totalmente plegable y portátil.
- Incorpora una ruedas en cada pata, lo que ayuda a transportarla de una habitación a otra.

## Especificaciones por lote

Cantidad por caja:  
1 unidad

## Materiales

Superficie de la cama: Acero soldado  
Estructura de la cama: Acero soldado  
Ruedas: Ensamblaje de plástico PP  
Motor: Ensamblaje con carcasa de ABS

## Almacenamiento:

- Si la cama no se arma de inmediato, conserve las cajas y el embalaje para su almacenamiento hasta que se complete el montaje.
- Guarde la cama empaquetada en un área seca.
- No coloque otros objetos encima de las cajas de la cama empaquetada.

## Condiciones de transporte:

La cama eléctrica, una vez embalada, puede ser transportada mediante medios convencionales, asegurando protección contra la lluvia y evitando golpes durante el traslado.

## Mantenimiento:

- Levante periódicamente las secciones de la cabecera y los pies de la cama para eliminar el polvo acumulado en la estructura.
- Retire el colchón de manera regular y limpie la plataforma de soporte.

## Instrucciones de Limpieza

### Superficies Metálicas

- Limpiar con un paño suave y una solución de agua tibia con detergente neutro.
- Secar completamente para evitar manchas o corrosión.

### Ruedas

- Limpiar regularmente con un paño húmedo para retirar polvo y suciedad acumulada.

### Motor y Componentes de ABS

- Usar un paño ligeramente húmedo, evitando el contacto directo con líquidos.

### Estructura General

- Retirar el colchón regularmente para limpiar la plataforma de soporte.
- Aspirar o limpiar para eliminar el polvo acumulado.

### Precauciones

- No usar productos abrasivos, alcohol o solventes.
- Asegurarse de que todo esté completamente seco antes de usar el equipo nuevamente.