

# TheraMart

MANUAL DE INSTRUCCIONES



SILLÓN RECLINABLE DE 3 POSICIONES

# TheraSenior

TM3100



**IMPORTANTE:**

LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR SU SILLÓN RECLINABLE DE 3 POSICIONES THERASENIOR TM3100

GUARDE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO.  
LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA DE ESTE MANUAL  
LO PUEDE ENCONTRAR EN:

[theramart.com](http://theramart.com)

# CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	4
USO PREVISTO .....	4
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD – LEER ANTES DE USAR .....	4
ADVERTENCIAS .....	5
CARACTERÍSTICAS .....	5
ENSAMBLAJE .....	6
INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE .....	6
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE .....	6
ENSAMBLAJE POSTERIOR .....	6
RUEDA DELANTERA DEL ENSAMBLAJE .....	6
RUEDA TRASERA DEL ENSAMBLAJE .....	8
FUNCIONAMIENTO .....	8
FUNCIONAMIENTO DE LAS RUEDAS .....	8
CÓMO OPERAR CON LAS RUEDAS TRASERAS BLOQUEADAS .....	9
CÓMO FUNCIONA EL SILLÓN RECLINABLE .....	9
CÓMO RECLINAR (PARA USO DEL USUARIO) .....	10
CÓMO RECLINAR (PARA USO DEL CUIDADOR) .....	10
ESTABILIZACIÓN DE LA POSICIÓN RECLINABLE .....	10
ARTICULACIÓN DEL REPOSACABEZAS .....	11
MESA INCORPORADA .....	11
ALMACENAMIENTO .....	12
CUIDADO Y MANTENIMIENTO .....	12
CADA TRES MESES .....	12
MANTENIMIENTO DEL TAPIZADO Y REMOCIÓN DE MANCHAS .....	12
RECOMENDACIONES CDC .....	12
CERTIFICACIÓN CE .....	14
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	14
GARANTÍA LIMITADA .....	15

## I. INTRODUCCIÓN

Este manual contiene las instrucciones de ensamblado, funcionamiento y mantenimiento para el sillón reclinable de 3 posiciones Theraseni<sup>or</sup> TM3100. Lea con cuidado el manual completo antes de utilizar el sillón reclinable y consúltelo durante el uso si tiene dudas. Si tiene más preguntas, consúltelo con su distribuidor local o contáctenos al siguiente correo:

[info@theramart.com](mailto:info@theramart.com)

### USO PREVISTO

El sillón reclinable de 3 posiciones Theraseni<sup>or</sup> está diseñado para facilitar y que sea más cómodo el cuidado, el tratamiento y la recuperación de los pacientes, al ayudar a aliviar las molestias causadas por dolencias circulatorias, respiratorias y de otro tipo. Theraseni<sup>or</sup> TM3100 soporta un peso del paciente de hasta 250 lb (113 kg), DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE.

### MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD – LEER ANTES DE USAR

Las declaraciones de seguridad presentadas en este capítulo se refieren a la información básica de seguridad a la que el usuario del TM3100 debe prestar atención y cumplir.

Hay declaraciones de seguridad adicionales en otros capítulos o secciones, que pueden ser iguales o similares a las siguientes o específicas de las operaciones. Tenga en cuenta las siguientes declaraciones especiales que se utilizan a lo largo de este manual y su significado:



#### ADVERTENCIA:

Indica una situación potencial de peligro o una práctica insegura que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones corporales graves.



#### PRECAUCIÓN:

Indica un peligro potencial o práctica insegura que, si no se evita, podría provocar lesiones corporales leves o moderadas.

#### AVISO:

Indica una práctica potencial de peligro o insegura que, si no se evita, podría provocar daños en el producto o la propiedad.

*Información: Brinda recomendaciones de aplicaciones u otra información útil para garantizar que aproveche al máximo su producto.*

### ADVERTENCIAS



#### ADVERTENCIA:

Lea este manual completo antes de ensamblar o utilizar.



#### ADVERTENCIA:

Controle periódicamente todas las partes y reemplácelas, si es necesario.



#### ADVERTENCIA:

No lo utilice cerca de una llama abierta, ya que el sillón reclinable podría ser una fuente de combustión y provocar un incendio, daños a la propiedad y lesiones corporales graves.

**ADVERTENCIA:**

El servicio y reparación del sillón reclinable de 3 posiciones Therasenior TM3100. DEBE realizarse por un distribuidor autorizado Theramart LLC.

**ADVERTENCIA:**

Theramart no se hace responsable ante cualquier consecuencia que pudiese resultar de un servicio o reparación no autorizado.

**ADVERTENCIA:**

Este producto tiene una capacidad de peso máxima de 250 lb (113 kg), DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE.

**ADVERTENCIA:**

Las ruedas traseras se deben bloquear siempre, excepto durante el transporte. Durante el traslado del paciente de la silla hacia otro lugar, las ruedas traseras se deben bloquear para evitar el deslizamiento.

**ADVERTENCIA:**

La modificación no autorizada de su sillón reclinable o el uso de piezas de repuesto que no sean de Theramart pueden cambiar la estructura del sillón reclinable y crear una condición peligrosa que puede resultar en lesiones graves y anulará la garantía.

**ADVERTENCIA:****AVISO PARA CLIENTES DE CALIFORNIA**

Proposición 65 California: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el DEHP, que según el estado de California causa cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos.

**ADVERTENCIA:**

Theramart rechaza específicamente la responsabilidad por cualquier lesión corporal o daño a la propiedad que pueda ocurrir durante cualquier uso que no cumpla con las leyes u ordenanzas federales, estatales o locales.



## CARACTERÍSTICAS

El sillón reclinable de 3 posiciones Therasenior TM3100. se muestra a continuación, con las principales características marcadas.



## ENSAMBLAJE

### INSTRUCCIONES DE DESEMBLAJE

Desembale e inspeccione el contenido en busca de daños por el transporte o piezas faltantes. Si las partes están dañadas o hay faltantes, contacte a su distribuidor The ramart inmediatamente.

### INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Ensamblaje posterior (consulte la imagen inferior)

1. Quite la pieza única del ensamblaje posterior de la silla sin ensamblar y déjelo a un lado.
2. Deslice el ensamblaje posterior en los tubos cuadrados del ensamblaje inferior, como se muestra, de modo que los orificios posteriores se alineen con los orificios del soporte horizontal del marco inferior.
3. Levante la barra de estabilización de posición y ajuste la posición del ensamblaje posterior hasta que el botón de liberación se acople totalmente a la ranura central del enlace de la barra de estabilización de posición, cuando la silla esté en la posición de guardado.
4. Inserte los tornillos a través de los orificios del soporte horizontal y apriete todos los tornillos con un destornillador.



Ensamblaje posterior



#### ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el tornillo superior a cada lado del tubo cuadrado del ensamblaje posterior esté completamente seguro antes de usar el sillón reclinable.

### RUEDA DELANTERA DEL ENSAMBLAJE



#### ADVERTENCIA:

Realice el siguiente paso solo con ayuda. Levantar el sillón reclinable sin ayuda puede provocar lesiones corporales.

1. Coloque el sillón reclinable boca abajo con las patas del marco hacia arriba.
2. Inserte los conjuntos de ruedas delanteras fijas en las patas delanteras del marco del sillón reclinable hasta que los botones de resorte salgan de las aberturas a cada lado (como se muestra en Rueda delantera del ensamblaje).



Rueda delantera del ensamblaje

## RUEDA TRASERA DEL ENSAMBLAJE

Herramientas necesarias: dos llaves de 7/16 "

1. Inserte las ruedas traseras con frenos en el marco posterior del sillón reclinable, mientras alinea el orificio del vástago de la rueda y el orificio del marco posterior como se muestra a la derecha, hasta que los orificios estén alineados.

2. Asegure los accesorios de fijación de las ruedas traseras (tuercas y arandelas) desde el exterior del sillón reclinable a través del marco posterior y ambos vástagos de las ruedas como se muestra.

3. Utilice dos llaves de 7/16 "para asegurar los accesorios de fijación de la rueda trasera.



### ADVERTENCIA:

Realice el siguiente paso solo con ayuda. Levantar el sillón reclinable sin ayuda puede provocar lesiones corporales. Coloque el sillón reclinable con el lado derecho hacia arriba y las ruedas hacia abajo. El sillón reclinable ya está listo para comenzar a utilizarse.



### ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el sillón reclinable esté ensamblado como se describe y que todos los componentes estén seguros antes de usarlo.



Rueda trasera del ensamblaje

## RUEDA TRASERA



## FUNCIONAMIENTO

### FUNCIONAMIENTO DE LAS RUEDAS



### ADVERTENCIA:


Las ruedas traseras se deben bloquear siempre, excepto durante el transporte. El sillón reclinable de 3 posiciones TheraSenior cuenta con ruedas de 12,7 cm diseñadas específicamente para uso en

entornos de atención médica:  
dos ruedas delanteras fijas sin  
bloqueo y dos ruedas traseras  
giratorias con frenos.

### CÓMO OPERAR CON LAS RUEDAS TRASERAS GIRATORIAS CON FRENOS

**Cómo bloquear la rueda trasera:**  
Presione la pestaña grande del freno  
ubicada en la parte posterior de la  
rueda. Esto bloqueará tanto la fun-  
ción giratoria como la rueda misma.

**Cómo desbloquear la rueda trasera:**  
Presione la pestaña pequeña en el  
marco de la rueda. Esto desbloquea-  
rá tanto la función giratoria como la  
rueda misma.

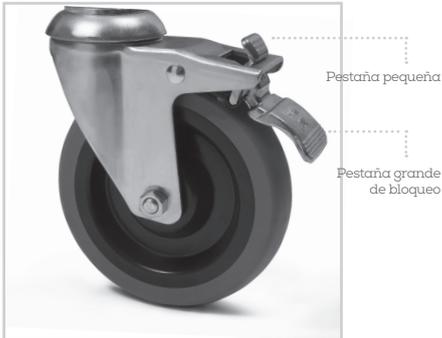

Rueda trasera bloqueada



Rueda trasera desbloqueada

### CÓMO FUNCIONA EL SILLÓN RECLINABLE



El sillón reclinable, que se muestra arriba a la izquierda en posición vertical y arriba a la derecha en la primera posición reclinada (posición de TV), tiene tres posiciones que se pueden lograr siguiendo las instrucciones a continuación.

### AVISO:

No intente cambiar la posición del sillón reclinable cuando la barra de estabilización de posición esté enganchada; esto podría dañar el mecanismo de reclinación.

## CÓMO RECLINAR (PARA USO DEL USUARIO)

**Reclinarse:** Coloque las manos en los apoyabrazos y empuje su cuerpo contra el respaldo del sillón reclinable para reclinarse a la posición deseada. El reposapiés se ajustará automáticamente a la posición reclinada.

**Regresar a la posición vertical:** Coloque las manos en los apoyabrazos y levántese mientras inclina su cuerpo hacia adelante, alejándose del respaldo del sillón reclinable y al mismo tiempo empuje las piernas hacia abajo uniformemente sobre el reposapiés.

## CÓMO RECLINAR (PARA USO DEL CUIDADOR)



### ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la barra de estabilización de posición esté en la posición de guardado.

- **Reclinarse a la primera posición de reclinado (posición de TV):** De pie a cada lado del sillón reclinable, agarrar el apoyabrazos con una mano y empuje hacia abajo el mango de empuje acolchado para reclinarse hasta la primera posición de reclinado. Si esta es la posición final deseada, ajuste la barra de estabilización de posición.

- **Reclinarse a la segunda posición de reclinado (posición de reclinado completa):** Después de reclinarse a la primera posición de reclinado (como se indica en el párrafo anterior), agarre el apoyabrazos con una mano y empuje hacia abajo el **mango de empuje acolchado** de nuevo. Si esta es la posición final deseada, ajuste la **barra de estabilización de posición**.

- **Regresar a la posición vertical:** Jale del mango de empuje acolchado hacia adelante. Ajuste la barra de estabilización de posición.




Ensamblaje posterior

## ESTABILIZACIÓN DE LA POSICIÓN RECLINABLE

**Para estabilizar la posición reclinable:** Ajuste el sillón reclinable a la posición deseada como se describe arriba, tire del botón de liberación para liberar la **barra de estabilización de posición** de la posición de guardado y gire la **barra de estabilización de posición** hacia abajo hasta que las muescas estén

completamente enganchadas sobre los pasadores de bloqueo.

**Para liberar la posición reclinable:**  
Levante la **barra de estabilización de posición** para desengancharla de los pasadores de bloqueo. Mientras sostiene el botón de liberación hacia afuera, gire la **barra de estabilización de posición** completamente hacia arriba hasta que esté completamente contra el respaldo del asiento. Suelte el **botón de liberación** para mantener la barra de estabilización de posición en la posición de guardado.

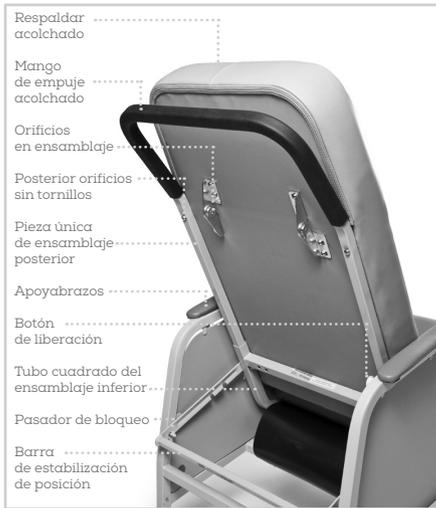

## ARTICULACIÓN DEL REPOSACABEZAS

El usuario o cuidador puede ajustar el reposacabezas articulado a la posición deseada tirando hacia adelante o hacia atrás.



## MESA INCORPORADA

### Funcionamiento

**Consulte la imagen de arriba.**

1. Tire de la mesa hacia arriba mientras sostiene los botones de liberación debajo de ambos brazos hasta que se enganche; luego deslice las llaves de bloqueo/desbloqueo hacia adelante en ambos lados.
2. Levante la mesa por el brazo circular de la mesa y deslícela dentro de los tubos receptores de la mesa en la parte delantera de cada brazo. La mesa puede deslizarse hacia adentro y hacia afuera manteniendo la llave de bloqueo/desbloqueo hacia adelante.
3. La mesa se puede asegurar en una de cinco posiciones: tire hacia abajo y mantenga presionado el botón de liberación y deslice la llave hacia atrás. Mueva la otra llave de bloqueo/desbloqueo hacia atrás. Ahora la mesa estará asegurada.

## ALMACENAMIENTO

La mesa se almacena en el tubo de almacenamiento de la mesa debajo del apoyabrazos izquierdo, dejando la parte superior de la mesa hacia afuera.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO



### ADVERTENCIA:

Controle periódicamente todos los elementos y reemplácelos, si es necesario.

### CADA TRES MESES

- Controle y limpie las ruedas.
- Ajuste los pernos de cada pata que aseguran las ruedas al marco.
- Controle los frenos de las ruedas.
- Revise y limpie el mecanismo de estabilización de posición.
- Verifique el funcionamiento del mecanismo del sillón en todas las posiciones con el asistente sentado en el sillón.

### MANTENIMIENTO DEL TAPIZADO Y REMOCIÓN DE MANCHAS

- Suciedad común: lavar con agua tibia y un jabón o detergente suave.
- Suciedad rebelde: con un cepillo de cerdas suaves, lavar con agua tibia y un jabón o detergente suave.
- Suciedad incrustada: frote con limpiador en polvo o detergente similar.
- Chicle: raspe con cuidado; eliminar con kerosene o nafta.

• Removedor y esmalte de uñas: seque inmediatamente para evitar daños.

• Bolígrafo: secar inmediatamente con un paño blanco humedecido en agua o aceite mineral.

• Pintura, betún para zapatos, marcas de tacones: ¡Quite inmediatamente! Utilice un paño blanco humedecido en kerosene, nafta o aguarrás. No utilice removedor de pintura ni limpiadores líquidos de brocha.

• Breas, asfalto, creosota: retirar para evitar manchas. Limpie la superficie con kerosene o nafta.



**ADVERTENCIA:** Cuando use kerosene o nafta, hágalo en un área bien ventilada y manténgalo alejado del fuego y las llamas.

• Encerado y repintado: mejora la resistencia al desgaste. Use cera en pasta de cualquier calidad.

• Se puede usar una solución diluida al 10% (o menos) de blanqueador o Clorox para limpiar este sillón reclinable.

## RECOMENDACIONES CDC

### *ESTRATEGIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES AMBIENTALES PARA TAPIZADOS, REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y PISOS DE VINILO EN ÁREAS DE ATENCIÓN AL PACIENTE*

• Seleccione desinfectantes registrados por la EPA, si están disponibles y utilícelos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- No utilice desinfectantes de alto nivel/esterilizantes químicos líquidos para la desinfección de instrumentos y dispositivos que no sean críticos o de cualquier superficie ambiental; dicho uso es contrario a las instrucciones de la etiqueta para estos químicos tóxicos.

- Siga las instrucciones de los fabricantes para la limpieza y mantenimiento del equipo médico que no sea crítico.

- En ausencia de las instrucciones de limpieza del fabricante, siga ciertos procedimientos:

- Limpie las superficies de equipos médicos que no sean críticos con un detergente/desinfectante.

- No utilice alcohol para desinfectar grandes entornos de superficies.

- Utilice una cubierta protectora según sea apropiado para superficies no críticas que:

- Se tocan de manera frecuente con guantes quirúrgicos durante la prestación de cuidado del paciente.

- Pueden contaminarse con sangre o sustancias corporales.

- Son difíciles de limpiar (por ejemplo, los teclados de las computadoras).

- Mantenga las superficies de limpieza (por ejemplo, pisos, paredes, mesas) visiblemente limpias de manera regular y limpie los derrames de inmediato.

- Utilice un proceso de un solo paso y un detergente/desinfectante hospitalario registrado por la EPA, diseñado para

finés generales de limpieza en áreas de atención de pacientes donde:

- Existe incertidumbre en cuanto a la naturaleza de la mancha en la superficie (ya sea sangre o fluidos corporales o simplemente polvo o suciedad normal).

- Existe incertidumbre con respecto a la presencia de organismos resistentes a múltiples fármacos en tales superficies.

- El detergente y el agua son adecuados para limpiar superficies en áreas que no son de atención para pacientes (por ejemplo, oficinas administrativas). Limpie y desinfecte, con más frecuencia, las superficies de alto contacto que las superficies de contacto mínimo. Limpie las paredes, persianas y cortinas de las ventanas en las áreas de atención al paciente cuando estén visiblemente sucias o polvorosas.

- No aplique desinfectante con pulverizador en las áreas de atención al paciente.

- Evite los métodos de limpieza de superficies grandes que produzcan neblinas o aerosoles o que dispersen el polvo en las áreas de atención al paciente.

- Siga los procedimientos adecuados para un uso eficaz de trapeadores, paños y soluciones.

- Prepare soluciones de limpieza diariamente o según sea necesario y reemplácelas con una solución nueva con frecuencia, de acuerdo con las políticas y procedimientos de la instalación.

- Cambie el cabezal del trapecador al comienzo de cada día y también según lo requiera la política de la instalación o después de limpiar grandes derrames de sangre u otras sustancias corporales.
- Limpiar trapecadores y trapos después de su uso y dejar secar antes de volver a usarlos; o use trapecadores desechables de un solo uso.
- Al realizar una desinfección de nivel bajo o intermedio de superficies ambientales en cuartos de bebés y unidades neonatales, evite la exposición innecesaria de los recién nacidos a los residuos de desinfectantes en estas superficies mediante el uso de germicidas registrados por la EPA, de acuerdo con las instrucciones y advertencias de seguridad del fabricante.



SILLÓN RECLINABLE DE 3 POSICIONES

## TheraSenior

Para completar todas las especificaciones técnicas, comuníquese con [info@theramart.com](mailto:info@theramart.com)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	SKU TM3100
Cumple con las especificaciones CA-TB133	- X
Altura promedio	120 cm
Ancho promedio	63,5 cm
Profundidad promedio	104 cm
Ancho entre los brazos	50 cm
Altura del brazo desde el suelo	66 cm
Altura del brazo desde el sillón	23 cm
Altura del sillón	53 cm
Ancho del sillón	48 cm
Profundidad del sillón	48 cm
Peso de transporte	50 kg
Capacidad de peso máxima	250 lb (113 kg) DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE

## GARANTÍA LIMITADA

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

Theramart garantiza al comprador original únicamente que solo reemplazará o reparará los elementos, a discreción exclusiva de Theramart, que tengan defectos de material o mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Todas las garantías están condicionadas al uso adecuado de los productos estrictamente de acuerdo con las buenas prácticas comerciales y las instrucciones y manuales de Theramart aplicables, incluido el uso y mantenimiento adecuados. En la medida en que un elemento esté garantizado por un tercero, Theramart transfirió todos sus derechos bajo esa garantía al comprador original, en la medida permitida. Esta garantía limitada solo se aplicará a los defectos que se informen al equipo de servicio al cliente de Theramart dentro del período de garantía aplicable y que, una vez examinados por Theramart o su representante autorizado, resulte ser

un artículo de garantía. Esta garantía limitada no es transferible. Dentro de las pautas establecidas en este documento, los siguientes elementos están garantizados durante el período de tiempo establecido a continuación:

<b>Marco:</b>	<b>un año</b>
<b>Tapizado:</b>	<b>un año</b>
<b>Todos los demás elementos:</b>	<b>un año</b>

El período de garantía aplicable comenzará a partir de la fecha de envío al cliente original, a menos que haya una fecha de vencimiento en el elemento, en cuyo caso la garantía vencerá en el período de garantía o la fecha de vencimiento, lo que sea primero.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Esta garantía limitada solo se aplicará a los defectos que se informen al distribuidor a quien el cliente compró el producto dentro del período de garantía aplicable. Si no hay un distribuidor, debe comunicarse directamente con Theramart llamando al +1 (305) 521 9440, o enviando una solicitud por correo electrónico a [infor@theramart.com](mailto:infor@theramart.com). El representante de servicio al cliente proporcionará instrucciones específicas. El incumplimiento de las instrucciones específicas resultará en la denegación del reclamo de garantía.

### EXCEPCIONES

La garantía no cubre y Theramart no será responsable de:

- 1) Los defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño en el transporte, alteración o no buscar y obtener reparación o reemplazo de manera oportuna;
- 2) Los productos que no se instalen, utilicen o limpien y mantengan adecuadamente como se requiere en el manual oficial del producto correspondiente;
- 3) Los productos considerados de naturaleza no duradera, y esto incluye, entre otros: ruedas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes y tablas;
- 4) Los accesorios o partes no brindados por Theramart;
- 5) Los cargos por parte de cualquier persona por ajustes, reparaciones, repuestos, instalación u otro trabajo realizado sobre en relación con dichos productos que no estén expresamente autorizados por escrito, por adelantado, por Theramart;
- 6) Cualquier mano de obra o gastos de envío incurridos en la instalación o reparación de la pieza de repuesto;
- 7) Los costos y gastos de mantenimiento y limpieza regulares; y
- 8) Las representaciones y garantías realizadas por cualquier persona o entidad que no sea Theramart.

### RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA COMPLETA, RECURSO EXCLUSIVO Y DAÑOS CONSECUENTES

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE THERAMART Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. THERAMART NO OFRECE GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI AL CLIENTE SE LE MOSTRÓ ALGÚN MODELO O MUESTRA, DICHO MODELO O MUESTRA **SE UTILIZÓ SÓLO PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO NECESARIAMENTE REPRESENTA EL PRODUCTO PER SE**. ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS. GF NO SERÁ RESPONSABLE Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, SECUNDARIO, EJEMPLAR O CONSECUENTE, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, PÉRDIDA DE USO, DURACIÓN, COBERTURA O SALARIOS, PAGOS Y BENEFICIOS DE EMPLEADOS O CONTRATISTA INDEPENDIENTE.

Las garantías que se encuentran en este documento contienen todas las representaciones y garantías con respecto al tema y reemplazan todas las negociaciones, acuerdos y entendimientos previos con respecto al mismo.

El destinatario de este documento reconoce y declara que no se ha basado en ninguna representación, afirmación, garantía, contrato colateral u otra garantía, excepto las establecidas en este documento.

Para obtener más información sobre este producto o esta garantía, comuníquese con un representante de servicio al cliente de Theramart.

### AVISOS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales.
- 2) Los reclamos de transporte deben anotarse en los documentos de envíos correspondientes y deben hacerse con urgencia. Las regulaciones internacionales, federales y estatales rigen los requisitos específicos para los reclamos de transporte. El incumplimiento de esas regulaciones puede resultar en la denegación del reclamo de transporte. Theramart lo ayudará a presentar el reclamo de transporte.
- 3) Los reclamos por cualquier envío corto deben realizarse dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha de la factura.

# TheraMart | SILLÓN RECLINABLE DE 3 POSICIONES TheraSenior



## CONTACT INFORMATION

Miami, Florida, USA  
+(1) (305) 521 9440

info@theramart.com  
www.theramart.com